




Veloped stokkholder – Monteringsveiledning

Den 2-delte stokkholderen til Veloped fungerer også som sikkerhetsstropp når Veloped'en foldes sammen for transport eller oppbevaring. Stokkholderen passer til alle Veloped-modellene.

Skann QR-koden med smarttelefonen eller enheten din for å se videoinstruksjoner.

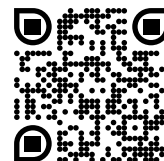

① Fest den bakre holderen.

Sett den bakre holderen rundt den øvre delen av det bakre vertikale rammerøret, like under den høydejusterende hurtigtutløseren.



② Trekk stroppen stramt.

Trekk stroppen stramt til, bind den rundt røret og fest den med borrelåsen. La den ekstra lengden på stroppen henge fritt.



③ Juster den bakre løkken.

Størrelsen på den bakre løkken kan justeres ved å løsne borrelåsen. Du må kanskje forme løkken forsiktig for å få en avrundet/sirkulær form.



④ Fest den fremre holderen.

Sett den fremre holderen rundt det øvre rammerøret, like bak kurvskinnfestet. Pass på at antisklilappen vender mot rammerøret.



⑤ Juster den fremre løkken.

Størrelsen på den fremre løkken kan justeres ved å løsne borrelåsen. Du må kanskje forme løkken forsiktig for å få en avrundet/sirkulær form.



⑥ Fest spaserstokken.

Fest spaserstokken ved å skyve den inn bakfra, først gjennom den bakre og deretter gjennom den fremre holderen.



⑦ Sikre rammen.

Du kan bruke stokkholderstroppen for å sikre rammen når den er foldet sammen, når du transporterer eller lagrer din Veloped.