

Veloped flaskeholder – monteringsanvisning


Veloped og rullator Universal flaskeholder som festes til Veloped-rammen med en skrudd klemme. Farge: svart.

Leveransen inkluderer en flaskeholder, klemmefeste og en 3 mm unbrakonøkkel.


Skann QR-koden med smarttelefonen eller enheten din for å se videoinstruksjoner.



① Skru løs og fjern én skrue fra klemmefestet.

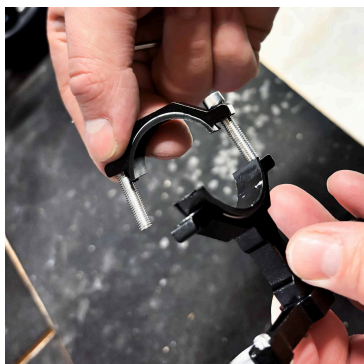

② Skru ut den andre skruen så langt som mulig, men la den være festet til klemmen.

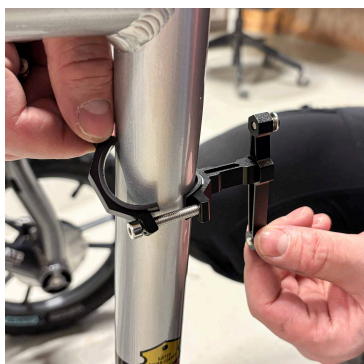

③ Roter den ene halvdel av klemmen 90 grader for å gjøre det enklere å montere klemmen på Veloped-rammen. Med den korte armen på flaskeholderen oppover, fest klemmen til den vertikale delen av høyre eller venstre bakre rammerør på Veloped-en. Når du skrur klemmen på Veloped-rammen, må du sørge for at begge skrueene er strammet likt.



④ Løsne de to skruene på klemmebraketten, og skru deretter flaskeholderen fast, helst med sideåpningen på flaskeholderen vendt utover.



⑤ Veloped-flaskeholderne er nå riktig montert og klare til bruk. Bra jobbet.