



Monteringsanvisning for Walker-stokkholder

2-delt stokkholder som festes til håndtaket og rammen på Walker. Den øvre delen har en smart hurtiglåsefunksjon, og stokken kan raskt festes og fjernes. Passer til rullatorene Walker 9er, 12er og 14er.

Skann QR-koden med smarttelefonen eller enheten din for å se videoinstruksjoner.



- ① Vri den øvre holderen slik at logoen vender oppover.



- ② Klikk holderen fast på den øvre delen av håndgrepsrøret.

Klikk holderen på den øvre delen av håndgrepsrøret, og skru den deretter på plass med en stjerneskrutrekker.



- ③ Hvis du fester både stokkholderen og ryggstøtten

Merk: Juster bremsespakens posisjon slik at det er plass til den øvre stokkholderen ved siden av ryggstøtten. Det kan være nødvendig å vippe stokkholderen utover, omtrent 30 grader, for å få plass til stokkholderen og ryggstøtten på Walker.




④ Fest den nedre holderen til rammen

For montering på høyre/venstre side, vri den nedre holderen slik at du kan nå skruen fra utsiden av rammen. For å feste den nedre holderen til rammen, surr stroppen rundt rammerøret og skyv den inn i hullet på holderen.



⑤ Stram skruen/stroppen

Stram skruen/stroppen med en 4 mm unbrakonøkkel.

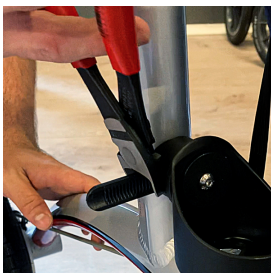

⑥ Klipp av den overflødige lengden på stroppen

Klipp av den overflødige lengden på stroppen med en kabelkutter.



⑦ Klar til bruk