



Manual: Montering av flaskeholder på Walker 12er størrelse S



① Monteringssted for flaskeholderen (H eller V).



② Surr stroppen rundt rammerøret og trekk den gjennom holderen.



③ Stram stroppen og vri mutteren med klokken for å stramme den.



④ Klipp av den overfløydige stroppen.



⑤ Monter den andre holderen på samme måte.



⑥ De to holderne er riktig montert på rammerøret.



⑦ Fest flaskeholderen med de to skruene. «Åpningen» på flaskeholderen skal vende utover.



⑧ Flaskeholderen er nå festet til rammen, og du setter flasken inn fra siden og tar den utover.