



Ryggstøtte til Trionic Walker – Monteringsanvisning

Den ergonomiske og polstrede ryggstøtten som er laget av vannavstøtende og varig polyester (600D), passer til rullatorene Walker 9er, 12er og 14er. Den gir en komfortabel og sikker støtte når du sitter.

Lengden/dybden på ryggstøtten er justerbar.

① Skru av.

Fjern skruene og mutrene fra de to klemmene.

② Fest ryggstøtten.

Åpne klemmene litt og fest dem på gripestengene.

VIKTIGT:Sørg for at logomerket "TRiONIC" er plassert riktig med tanke på at ryggstøtten er vinklet.

③ Helt opp.

Dytt de to klemmene helt til toppen. Du må kanskje løsne skruen på bremsespaken for å flytte den litt bakover.

④ fest ryggstøtten.

Fest både skruer og muttere på begge klemmene med en unbrakonøkkel (4 mm). Stroppene på ryggstøtten skal peke forover mot festepunktet.

⑤ Dette bildet viser den riktige monteringen.

Før du bretter ut rollatoren.

Før å legge sammen rullatoren må du vinkle ryggstøtten oppover.

Om nødvendig.

Hvis du synes at ryggstøtten er for kort eller for lang kan du justere lengden. Fjern de to skruene og mutrene og monter ryggstøtten på nytt.