



Manual: Utskifting av Trionic Walker-ryggstroppen




① Skru løs skruen som holder stroppen med en 3 mm unbrakonøkkel.

Gjenta på motsatt side.



② Sørg for at du finner tilbake skruen, mutteren og den rørformede avstandsstykket.

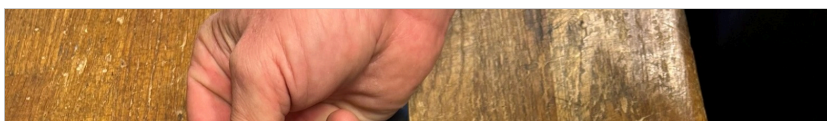



Manual: Utskifting av Trionic Walker-ryggstroppen



- ⑤ Sett den nye erstatningsstroppen inn i polstringen.

VIKTIG: Sørg for å justere enden av stroppen med TRIONIC-logoen som vist på bildet.



- ⑥ Sett den rørformede avstandsstykket inn i hullet på enden av stroppen.

