



Walker Transportveske - Pakkeinstruksjoner


Walker transportveske består av hovedvesken for transport, en mindre veske for lagring og vesken som inneholder transportveskene.

Passer alle Trionic Walker-modeller.




1 Åpne hovedposen

Pakk opp oppbevaringsposen og pakk ut hovedtransportposen.

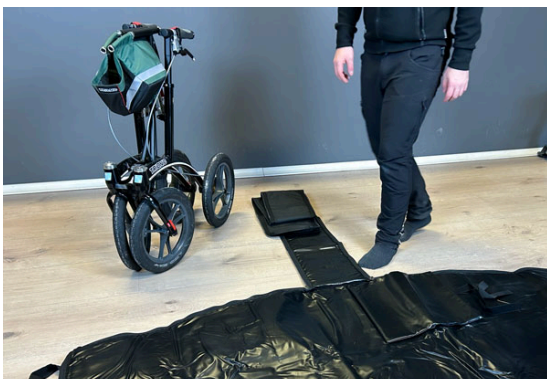

2 Spre hovedposen.

Løsne glidelåsen i hele lengden av hovedveskens glidelås og brett ut klaffene på vesken på gulvet.

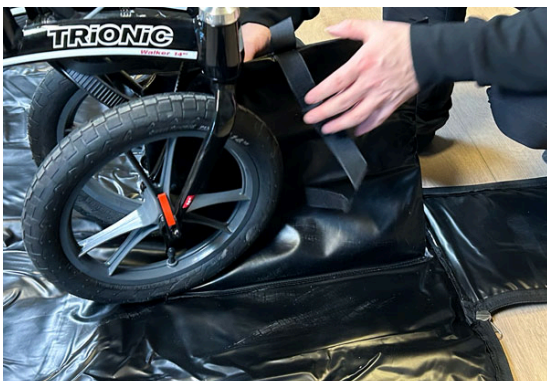

3 Plasser rullatoren på posen.

Plasser Walker på den midtre delen av hovedtransportvesken. Hovedvesken har en integrert polstret beskyttelsesklaff med borrelås. Trekk den polstrede beskyttelsesklaffen oppover og plasser den mellom forhjulsgaflene for å beskytte lakken.



④ Fest den foldede rammen med den integrerte borrelåsremmen.



⑤ Brett midtklaffen over Walker.



⑥ Løft sideklaffene og lukk hovedglidelåsen.



⑦ Dette bildet viser Walker som riktig pakket.

Pakkeinstruksjoner



Skann QR-koden med smarttelefonen eller enheten din for å se videoinstruksjoner.